



1. Valandą iki seilių mėginio surinkimo nevalgykite, negerkite, nerūkykite ir nekramtykite gumos. Sutartu jums patogiu laiku, prisijunkite prie vaizdo konferencijos, naudodami nuorodą, kurią gavote el. paštu. Vaizdo konferencija reikalinga jūsų tapatybės patvirtinimui. Vaizdo konferencijos metu sekite medicinos darbuotojo nurodymus, patvirtinkite savo tapatybę ir surinkite seilių mėginį, vadovaudamiesi žemiau pateiktais punktais.
2. Atidarykite pakuotę ir išimkite rinkinio komponentus: piltuvėlį su mėgintuvėliu, skirtu seilių surinkimui (A), mėgintuvėlį su stabilizavimo terpe (B), dezinfekcinę servetėlę (C). Ant mėgintuvėlio, skirto seilių mėginiui, užrašykite savo vardą ir pavardę.
3. Per piltuvėlį švelniai išleiskite seiles į mėgintuvėlį, kol pasiekama 2 ml riba. Seilių putos turėtų būti virš pažymėtos ribos.
4. Ant surinktų seilių užpilkite seilių stabilizavimo terpę, neišmeskite kamštelio.
5. Nuo mėgintuvėlio nusukite piltuvėlį, užsukite kamštelį.
6. Mėgintuvėlį sumaišykite vartant bent 10 kartų.
7. Mėgintuvėlį dėkite atgal į maišelį su sugertuku ir užspauskite. Dezinfekuokite maišelį. Paruoštą mėginį laikykite kambario temperatūroje.
8. Maišelį su mėginiu dėkite į dėžutę, o dėžutę į kurjerinį voką, gautą su rinkiniu, sandariai užklijuokite. Transportavimui paruoštą mėginį laikykite kambario temperatūroje.
9. Surinktą seilių mėginį galite atvežti ir įdėti į UAB Diagnolita mėginių surinkimo dėžutę, esančią Saulėtekio al. 7C, kairėje pastato pusėje. Nesant galimybės pristatyti mėginį patiemis, pažymėkite apie tai užklausoje formoje. Mėginys bus paimtas iš jūsų ir pristatytas į laboratoriją naudojantis kurjerių paslaugomis. Tyrimo atsakymai pateikiami per 24 val. nuo mėginio gavimo. Atsakymo rezultatai pateikiami puslapyje esveikata.lt